



弾性ストッキング着用補助具

ストッキングドナー

履きやすい、履かせやすい、
弾性ストッキング着用補助具



弾性ストッキング着用補助具

ストッキングドナーのご使用方法

ご使用方法 ※転倒しないようにご注意ください。



①まずストッキングを半円の枠の部分に通します。この時、かかところが後ろにくるように確認してください。



②ストッキングの上の部分を①の半円の枠に覆いかぶせるようにし、少しずつ、かかとの部分が見えるまで下に向かって両側を引っ張ります。



③椅子などに腰掛け、足をつま先から入れていきます。この時ストッキングのかかとの部分を軽く引っ張り、枠に押し付けるようにしておくと、着用しやすくなります。



④つま先が完全に床につきましたら、器具の両側の黒い部分を持ちあげ、ゆっくりと引き上げてください。必要以上にストッキングを伸ばさないようご注意ください。



⑤本品をゆっくり引き上げふくらはぎの上までストッキングが着用できたら本品を外します。外す際は本品を押し下げのようにします。残りの部分は手で上げていきます。



⑥かかとの部分が正しくかかところに着用されていることを確認します。最後に長さを調整しながら手のひらでしわを伸ばしていきます。ねじれや偏りのないように確認してください。

製品コード	梱包単位	共通商品コード(JAN)	希望小売価格(本体価格・税別)
JP-SD110913	1台/箱	4987601595899	4,290円(3,900円)